



Timer B.V.Drentse Poort 25a 9521 JA Nieuw-Buinen Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)599 – 639 614

Website: www.timerproducts.com

E-mail: info@timerproducts.com

1. BESCHRIJVING 12BREATHE FFP2 MASKER

Het 12BREATHE masker heeft een beschermingsklasse FFP2. Het beoogde gebruik van dit masker is om de gebruiker te beschermen tegen schadelijke aerosolstoffen, zowel vast als vloeibaar. Meer specifiek biedt het 12BREATHE-masker bescherming aan de gebruiker in de categorie FFP2. Het gebruik van dit type maskers is voornamelijk in zorginstellingen, maar niet beperkt tot dit soort instellingen. Het masker is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.


2. WAARSCHUWINGEN

- Betreed geen ongeventileerde ruimte als u het masker draagt
- Het masker is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten die lijden aan dyspneu of aangeboren hartfalen
- Gebruik het masker niet in het geval van gezichtsbehaarung, zoals een baard, of piercings in het gezicht
- Verander het masker niet
- Het masker is niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt
- Het masker is alleen bedoeld voor eenmalig gebruik
- Gebruik het masker niet meer na de houdbaarheidsdatum
- Gebruik het masker niet in een explosieve atmosfeer
- Gooi het masker weg na eenmalig gebruik
- Gebruik het masker niet in een zuurstofarme omgeving (<19,5%).
- Het masker mag niet worden gebruikt als bescherming tegen gassen, dampen of chemische, biologische, radioactieve en nucleaire oorlogsmiddelen
- Stop met het gebruik van het masker als het beschadigd raakt of als het masker niet meer goed past

3. OPSLAG EN REINIGING

- Bewaar het masker zoals beschreven op de verpakking (bewaren tussen -20°C en +25°C)
- Gebruik alleen de originele verpakking
- Reinig of hergebruik het masker niet

4. SYMBOLEN

FFP2	Beschermingsklasse van het masker: virale deeltjes
NR	Het masker is bedoeld voor eenmalig gebruik
	Vervaldatum van het masker (jaar/maand)
	Opslag condities
	Lees voor gebruik altijd de handleiding
	Maximale luchtvochtigheid bij opslag

5. AANWIJZINGEN



Cijfer 1: Instructies voor het gebruik van het masker

- Zorg er voor gebruik van het masker voor dat het masker nog binnen de houdbaarheidsdatum is, dat het masker niet beschadigd is en dat uw handen schoon zijn. Gebruiksaanwijzing zie figuur 1:
 1. Open het masker
 2. Zorg ervoor dat u de neusklem rechtzet
 3. Plaats het masker onder je kin en over je neus en mond
 4. Plaats de onderste hoofdband achter je hoofd in de nek
 5. Plaats de bovenste hoofdband achter je oren
 6. Zorg er met twee handen voor dat de neusklem is gevormd naar de vorm van uw neus. Zorg ervoor dat het masker goed past. Het vormen van de neusklem met één hand kan leiden tot lekkage.
 7. Bedek het masker volledig met je hand en adem uit. Als er lucht lekt, stel dan de neusklem af.
 8. Alle uitgeademde/ingeademde lucht moet door het masker gaan, als dit niet het geval is, kan het masker u niet beschermen.

Het 12BREATHE-masker is getest en goedgekeurd volgens (EU) 2016/425 en EN 149:2001+A1:2009.

Het masker is getest en gecertificeerd door Dekra Testing and Certification, Handwerkstraße 15. 70565 Stuttgart, Duitsland.